

Handleiding TV Hoorsysteem


✓ Ontvangst TV Hoorsysteem

U heeft van ons uw nieuwe TV Hoorsysteem compleet ontvangen. Volg de gebruiksaanwijzing voor het in gebruik nemen en de werking van het systeem.

✓ Installatie

Er zijn verschillende mogelijkheden uw TV systeem aan te sluiten. Dit is afhankelijk van uw TV en/of provider. Hieronder geven wij enkele mogelijkheden en tips!

- Heeft u bij uw TV een extra kastje (decoder) van uw provider, dan kunt u er veelal ook voor kiezen uw TV systeem op dit kastje aan te sluiten! Het zij Analoog, het zij Digitaal!

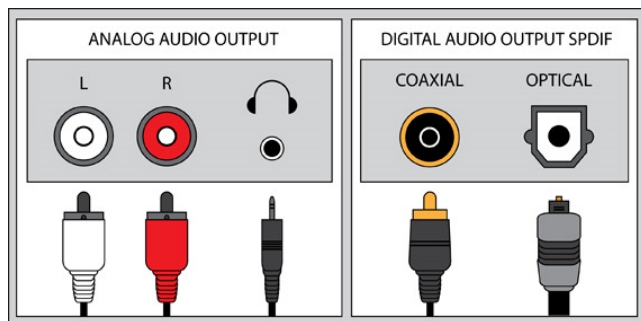

Audio converter Digitaal/Analoog

Analoge aansluiting

U kunt uw TV Hoorsysteem aansluiten met de bijgeleverde bekabeling op een analoge aansluiting van uw TV.

- U kunt een aansluiting hiervoor vaak herkennen aan een Rood/Witte Tulp aansluiting welke veelal aan de achterkant van uw TV beschikbaar is.
- Ook kunt u proberen uw TV systeem aan te sluiten op de hoofdtelefoon uitgang van uw TV. Hierbij worden bij de meeste TV's echter de speakers automatisch uitgeschakeld, waardoor mede bewoners het geluid van de TV niet meer kunnen horen. In sommige gevallen kunt u in het menu van uw TV tegenwoordig aangeven of de speakers aan of uitgeschakeld moeten worden.

Digitale aansluiting

De allernieuwste TV toestellen zijn tegenwoordig vaak alleen nog maar voorzien van digitale aansluitingen zoals, HDMI, Toslink (Optical) of Coax signaal.

- Indien uw TV Hoorsysteem is voorzien van een digitale Toslink (Optical)aansluiting, kunt u deze met bijgeleverde kabel direct aansluit op de digitale uitgang van uw TV of Decoder.
Let op! Vaak dient u uw TV hoorsysteem aan de achterkant van de zender om te schakelen naar Digitaal!
- Indien uw TV Hoorsysteem geen digitale aansluiting heeft, dient u gebruik te maken van een "audio converter". Dit is een speciaal kastje dat een digitaal signaal vanuit uw TV om zet naar een analoog signaal voor uw TV Hoorsysteem.

✓ Telefonische begeleiding

Indien bovengenoemde aansluittips niet afdoende blijken te zijn kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0345-632920. Wij zullen u mondeling trachten te begeleiden bij het aansluiten van uw TV systeem.

✓ Een monteur

Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken om de aansluiting van uw TV Hoorsysteem door een van onze monteurs bij u thuis te laten verzorgen.

Bij verder vragen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer.