

Handleiding Wek- en Waarschuwingssysteem (Trilset)

✓ Trilontvanger (pager) + laadstation

De trilontvanger stopt na 1 minuut vanzelf met trillen. Door op het ronde drukknopje aan de linkerzijde van de trilontvanger te drukken, stopt het trilsignaal direct.

Trillen + oranje indicatielampje: melding telefoon
Trillen + groen indicatielampje: melding deurbel
Trillen + alle indicatielampjes: melding rookmelder

Indien het rechter (oranje) indicatielampje op de trilontvanger gaat branden is de accu leeg en dient de trilontvanger opgeladen te worden.

Tijdens het opladen van de trilontvanger moet de trilontvanger uitgeschakeld zijn door de schuifknop on/off op 'off' te zetten. Er zal een rood/blauw lampje op de lader gaan branden. Als de trilontvanger opgeladen is zal het lampje groen/blauw kleuren.

De accu's (750mAh, 1.2V) in de trilontvanger mogen niet worden vervangen door batterijen.

✓ Deurbelzender/Telefoonzender

Bij zowel de deurbel, als de telefoon, is een zender geplaatst. Deze zender zendt een signaal door als de deurbel of telefoon overgaat, hierdoor zal de trilontvanger gaan trillen en de wekker afgaan.

Indien er een akoestische deurbelzender geplaatst is, is deze door middel van een kleefmicrofoon aan de geluidsbron van de deurbel verbonden. Het is belangrijk dat deze kleefmicrofoon ten alle tijden is verbonden met de geluidsbron van de deurbel.

In de zenders zit een 9V blokbatteerij. Deze gaat gemiddeld 1 mee. Mocht de batterij leeg zijn, kan deze gemakkelijk aan de achterzijde van de zender vervangen worden.

✓ Rookmelder

Zodra deze speciale rookmelder geactiveerd wordt, zal de trilontvanger gaan trillen en de wekker afgaan. Alle indicatielampjes op de trilontvanger en wekker gaan branden.

Op de rookmelder bevindt zich een test-knop om de werking van de rookmelder te testen. Indien u deze 2 à 3 seconden inhoudt, zal de rookmelder een akoestisch signaal geven. Daarnaast zal de trilontvanger gaan trillen en de wekker afgaan.

De rookmelder bevat een accu die 10 jaar meegaat.

✓ Digitale wekker + trilschijf

Naast dat deze wekker afgaat op een gewenste wek-tijd, geeft deze wekker ook een akoestisch en trilsignaal als de telefoon, deurbel of rookmelder afgaat.

Door het ingedrukt houden van de knop 'klok' en tegelijkertijd de knop 'h' of 'min' in te drukken wordt de tijd op de wekker ingesteld.

De wek-tijd instellen kan door het ingedrukt houden van de knop '1' en tegelijkertijd de knop 'h' of 'min' in te drukken.

De alarmfunctie wordt ingeschakeld door aan de achterzijde van de wekker de schuifknop 'on/off' op 'on' te zetten. Vervolgens zal er een rood lampje aan de voorzijde van de wekker gaan branden.

Het volume van het akoestische signaal kan aan de rechterzijde van de wekker worden afgesteld. De toonhoogte kan aan de linkerzijde van de wekker afgesteld of volledig uitgeschakeld worden.

De wekker beschikt over een snoozefunctie van 5 minuten. Deze wordt ingeschakeld als er op de zwarte snooze knop op de bovenzijde wordt gedrukt.

Komt er een signaal van deurbel, telefoon of rookmelder binnen, dan zal de wekker 1 minuut afgaan. Dit kan vroegtijdig beëindigd worden door het indrukken van de snooze knop.

De trilschijf bevat 3x AA batterijen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer.