

# Gebruiksaanwijzing

## Music Vibes

HOOR  
expert

Hear Solutions AUDIOropa

### Draagwijze

Hang de hoofdtelefoon aan de achterkant van de nek en plaats tegelijkertijd de hoofdtelefoon op het jukbeen vóór het oor. (zie afbeelding)

Blijf omgevingsgeluiden horen terwijl u muziek aan het luisteren bent!

### Koppelingsmethode

Houd de aan / uit-knop 3 seconden lang ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen. Houd de hoofdtelefoon en de mobiele telefoon in het bereik van 1 meter van elkaar om ze voor de eerste keer te koppelen. Zorg er wel voor dat de bluetooth op uw telefoon aan staat. De rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend als de hoofdtelefoon wordt aangezet; de koppelingsmodus is ingeschakeld (als de hoofdtelefoon niet in de koppelingsmodus komt, druk dan 3 seconden op de multifunctionele knop totdat de rode en blauwe lampjes afwisselend knipperen).

Open in de instellingen op uw mobiele telefoon de BT-set of de apparaten met de BT-functie. Zoek vervolgens in de lijst met BT-apparaten en kies koppelingsnaam 'Z8'. Voer zonodig de pincode van '0000' in.

De blauwe LED knippert langzaam wanneer de koppeling is gelukt.

### Let op:

Als de afstand tussen de hoofdtelefoon en de BT-apparaten meer dan 10 meter is, wordt de BT-hoofdtelefoon losgekoppeld van de apparaten. Daarna zullen ze, zodra ze binnen het bereik van 10 meter zijn, automatisch opnieuw verbinden.

Als de hoofdtelefoon echter meer dan 3 minuten is losgekoppeld, moet u tweemaal op de multifunctionele knop klikken om de apparaten opnieuw te verbinden.

Als de koptelefoon is gekoppeld, drukt u lang op de multifunctionele knop gedurende 3 seconden waarna de koptelefoon de koppelingsmodus opnieuw start. Nu kunnen ook andere mobiele telefoons de BT-hoofdtelefoon vinden en verbinden.



## Verbind twee apparaten

Volg de koppelingmethode; koppel de eerste mobiele telefoon en houd de afspreekknop lang ingedrukt totdat de BT-koptelefoon weer in de koppelingsmodus komt. Koppel nu de tweede mobiele telefoon.

Ga naar de instellingen van de eerste mobiele telefoon en sluit de Z8 opnieuw aan.

## Opladen

U kunt de hoofdtelefoon opladen door deze met de micro-USB-kabel (meegeleverd) aan te sluiten op de USB-poort van uw PC of laadbron. Het duurt 2 uur om volledig op te laden. Tijdens het opladen is de led-indicator ROOD en na het opladen is de LED-indicator BLAUW.

## Let op:

Omdat de batterij mogelijk wat energie verliest in de opslag, raden we u aan uw hoofdtelefoon op te laden voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.

Tijdens het opladen kan de hoofdtelefoon niet worden gebruikt.

Als u langere tijd de hoofdtelefoon niet gebruikt, kunt u deze het beste eens per maand opladen om de batterij te sparen.

## LED-indicator

**Rode LED knippert snel:** laag stroomniveau

**Rode LED brandt:** opladen is bezig

**Blauwe LED brandt:** laden is voltooid

**Blauwe en rode LED knipperen afwisselend:** koppelingsmodus

**Blauwe LED knippert langzaam:** verbonden / bellen / muziek afspelen

**Blauwe LED knippert snel:** binnenkomende oproep

**Blauwe LED knippert langzaam:** de hoofdtelefoon kan geen verbinding maken met de mobiele telefoon.

## Productaccessoires

USB-kabel

Oordopjes om indien gewenst wel het omgevingsgeluid te dempen

## Specificaties

**Type luidspreker:** beengeleidingstechnologie / luidsprekers

**Speeltijd:** tot 5 uur (afhankelijk van het daadwerkelijke volume en de geluidsbron)

**Oplaadtijd:** 2 uur

**Standby-tijd:** tot 10 dagen

**Effectief bereik:** 10 meter (33 voet)

## Opslag en onderhoud

Bewaar de BT-hoofdtelefoon op een koele, droge plaats. De beste temperatuur is van -10 tot maximaal 45 graden Celcius.

In koude, hete of extreem vochtige plaatsen zal de batterijduur afnemen.

**Na langdurige opslag:** laad de hoofdtelefoon op voor gebruik.

De hoofdtelefoon is bestand tegen water, maar is niet waterdicht. Stop de koptelefoon niet in water. Als er water op zit, gebruik dan een zachte doek om schoon te vegen.

Gebruik een zachte, droge doek om de hoofdtelefoon schoon te maken.

Laad de hoofdtelefoon niet op in een vochtige omgeving.