

KORTE HANDLEIDING

WEK- EN
WAARSCHUWINGSSYSTEEM
SIGNOLUX FLITSSET



Dé specialist in hooroplossingen

ZENDERS



Bij alle apparaten die een geluidssignaal geven, zoals deurbel en telefoon, is een zender geplaatst. Rookmelders hebben een ingebouwde zender. De zenders sturen een signaal naar alle ontvangers als de deurbel, telefoon of rookmelder overgaat of geactiveerd wordt. Hierdoor zullen de flitslampontvangers gaan flitsen en zal de wekker gaan flitsen/trillen.

Rookmelder/Brandmelder/CO-melder




Op de melder bevindt zich een test-knop om de werking van de melder te testen. Indien u deze 2 à 3 seconden ingedrukt houdt, zal de rookmelder een geluidssignaal geven. Daarnaast zullen de flitslampontvangers gaan flitsen en zal de wekker gaan flitsen/trillen.

De melder(s) bevatten een accu die u niet zelf kunt vervangen. Wij zorgen ervoor dat uw melder(s) minimaal de - door uw zorgverzekering gestelde - gebruikstermijn goed werken maar u bent gebaat bij het

goed onderhouden van uw melder(s). Haal daarom om de maand even een stoffer of stofzuiger langs de melder(s) om de ingebouwde sensor schoon te houden.


ONTVANGERS


Digitale wekker + trilschijf

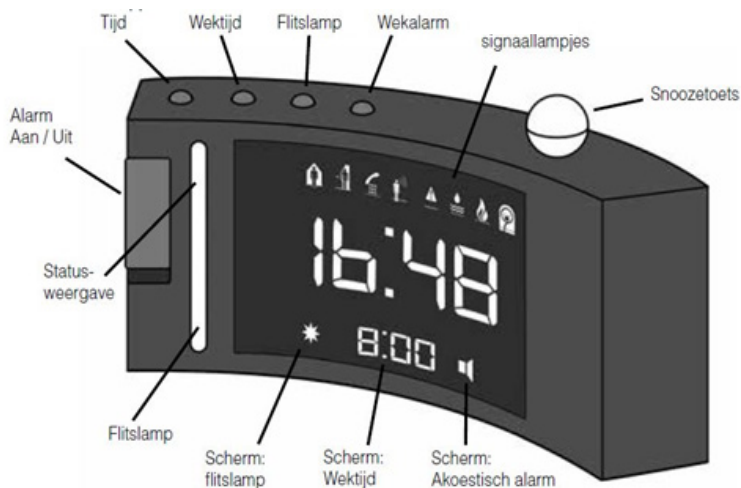

Wanneer er een signaal van deurbel, telefoon of brandmelder melder binnenkomt, zal de wekker 1 minuut geluid maken, flitsen en een eventueel aangesloten trilschijf laten trillen. U kunt ook zien aan de gekleurde lampjes om welk signaal het gaat. De alarmering kan vroegtijdig beëindigd worden door de snooze knop in te drukken.

De displayhelderheid voor s 'nachts kunt u instellen door de 'flitslamp' knop ingedrukt te houden en te draaien aan het instelwielje aan de achterzijde van de wekker. Overdag zullen de cijfers van de display fel licht blijven geven. Alleen 's nachts worden ze gedimd.

Het flitslicht op de wekker (reageert op alle wek- en waarschuwingssignalen) kunt u aan- of uitzetten door de 'flitslamp' knop 1 seconde ingedrukt te houden. Als de flitslamp aan staat, is  zichtbaar in de display.

Het geluid van de wekker kunt u aan- of uitzetten door de 'wekalarm' knop 1 seconde ingedrukt te houden. Als het geluid aan staat, is  zichtbaar in de display.

Het volume van de wekker kunt u afstellen door de 'wekalarm' knop ingedrukt te houden en te draaien aan het instelwielje aan de achterzijde van de wekker. Indien gewenst kunt u met deze werkwijze ook het volume volledig uitschakelen.

De toonsoort van de wekker kunt u instellen door meermaals op de 'toon' knop op de achterkant van de wekker te drukken.

Om de tijd in te stellen drukt u 1 seconde op de 'tijd' knop. Hierdoor gaat de uur-aanduiding knipperen. Draai aan het instelwielje (achterkant wekker) totdat het gewenste uur is bereikt. Druk vervolgens nogmaals op de 'tijd' knop om deze instelling te bevestigen. Nu gaat de minuut-aanduiding knipperen. Draai aan het instelwielje (achterkant wekker) totdat het gewenste minuut is bereikt. Druk vervolgens nogmaals op de 'tijd' knop om deze instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale display.

Om de wek-tijd in te stellen drukt u 1 seconde de 'wektijd' knop. Hierdoor gaat de uur-aanduiding knipperen. Draai aan het instelwiel (achterkant wekker) totdat het gewenste uur is bereikt. Druk vervolgens nogmaals op de 'wektijd' knop om deze instelling te bevestigen. Nu gaat de minuut-aanduiding knipperen. Draai aan het instelwiel (achterkant wekker) totdat het gewenste minuut is bereikt. Druk vervolgens nogmaals op de 'wektijd' knop om deze instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale display.

De wekkerfunctie wordt in- of uitgeschakeld door de schuifknop op de linker kant van de wekker op of neer te schuiven. Als de wekker aan staat, is de wek-tijd zichtbaar in de display.

Gebruik deze zelfde schuifknop om het alarm uit te schakelen.

De wekker beschikt over een snoozefunctie van 5 minuten. Deze wordt ingeschakeld als er op de zilveren snooze knop op de bovenzijde wordt gedrukt.

De in de wekker geplaatste back-up batterijen dient u eenmaal per jaar te vervangen. Hierdoor bent u er zeker van dat de wekker ook bij stroomuitval zal blijven functioneren.

Flitslamp stekkermodel



Af en toe flitst een rood lampje onderaan de flitslamp. Dit geeft aan dat

de lamp operationeel is en dat er goede verbinding is met de zenders.
Dit is normaal en kan niet uitgeschakeld worden.

De flitslampen kunnen in ieder stopcontact in huis geplaatst worden.
U kunt zien aan het symbool dat oplicht om welke melding het gaat.

Bijvoorbeeld:

Flitsen + **oranje** indicatielampje: melding telefoon

Flitsen + **groen** indicatielampje: melding deurbel

Flitsen + **rood** indicatielampje: melding rook/brandmelder

De flitslamp stopt na 1 minuut vanzelf met flitsen.

Flitslamp 360graden model - oplaadbaar



Af en toe flitst een rood lampje onderaan de flitslamp. Dit geeft aan dat de lamp operationeel is en dat er goede verbinding is met de zenders.
Dit is normaal en kan niet uitgeschakeld worden.

Een volledig opgeladen flitslamp kan overal geplaatst worden.

U kunt zien aan het symbool dat oplicht om welke melding het gaat.

Bijvoorbeeld:

Flitsen + **oranje** indicatielampje: melding telefoon

Flitsen + **groen** indicatielampje: melding deurbel

Flitsen + **rood** indicatielampje: melding rook/brandmelder

De flitslamp stopt na 1 minuut vanzelf met flitsen.

Ons advies is om de flitslamp **iedere nacht** op te laden.

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar op onze website.
Bij storingen of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via
onderstaande contactgegevens.

Hoorexpert Ontzorgt!

Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam

+31 (0)345 63 23 93

info@hoorexpert.nl

www.hoorexpert.nl