

KORTE HANDLEIDING

# TV-HOORSYSTEMEN INSTALLEREN




Dé specialist in hooroplossingen

## INSTALLATIE

Er zijn verschillende manieren om uw TV-systeem aan te sluiten. Dit is afhankelijk van uw TV en/of provider.

Heeft u bij uw TV een extra kastje (decoder) van uw provider, dan kunt u er veelal ook voor kiezen uw TV systeem op dit kastje aan te sluiten, hetzij analoog of digitaal.

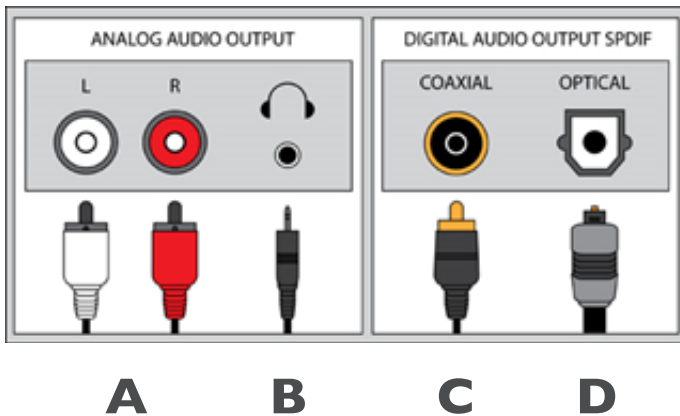

### ANALOGIE AANSLUITING

U kunt uw TV-Hoorsysteem aansluiten met de bijgeleverde bekabeling op een analoge aansluiting van uw TV.

**A** U herkent de aansluiting hiervoor vaak aan een rood/witte tulp aansluiting welke veelal aan de achterkant van uw TV beschikbaar is.

**B** U kunt ook uw TV-systeem aansluiten op de hoofdtelefoon uitgang van uw TV. Hierbij worden bij de meeste TV's echter de speakers automatisch uitgeschakeld, waardoor medebewoners het geluid van de TV niet meer kunnen horen. In sommige gevallen kunt u in het menu van uw TV tegenwoordig aangeven of de speakers aan of uitgeschakeld moeten worden.

## DIGITALE AANSLUITING

De allernieuwste TV-toestellen zijn tegenwoordig vaak alleen nog maar voorzien van digitale aansluitingen zoals HDMI, Coax ( **C** ) of Toslink Optical ( **D** ) signaal. Indien uw TV-Hoorsysteem is voorzien van een digitale Toslink (Optical) aansluiting, kunt u deze met bijgeleverde kabel direct aansluiten op de digitale uitgang van uw TV of Decoder. Let op! Vaak dient u uw TV-hoorsysteem aan de achterkant van de zender om te schakelen naar de stand 'digitaal'.

Indien uw TV-Hoorsysteem geen digitale aansluiting heeft, dient u gebruik te maken van een audio converter. Dit is een speciaal, apart te verkrijgen kastje dat een digitaal signaal vanuit uw TV omzet naar een analogo signaal voor uw TV-Hoorsysteem.

## LAADSTATION EN ONTVANGER MET ELKAAR VERBINDEN

Zo maakt u uw TV-Hoorsysteem gebruiksklaar:

- 1) Zet het laadstation uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
- 2) Zet de ontvanger (kinbeugel of inductielus) aan. Het groene lampje er bovenop gaat knipperen.
- 3) Houd het 'Mic' knopje ingedrukt totdat het groene lampje sneller gaat knipperen.
- 4) Laat het 'Mic' knopje los en zet het laadstation meteen weer aan (stekker in stopcontact).

## EXTRA HULP BIJ INSTALLATIE

Indien de bovengenoemde aansluittips niet afdoende blijken te zijn, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0345-632393. Wij zullen dan trachten u mondeling te begeleiden bij het aansluiten van uw TV-systeem.

Uiteraard kunt u ons ook altijd verzoeken om de aansluiting van uw TV-systeem door een van onze monteurs bij u thuis te laten verzorgen.

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar op onze website.  
Bij storingen of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via  
onderstaande contactgegevens.

*Hoorexpert Ontzorgt!*

Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam

+31 (0)345 63 23 93

info@hoorexpert.nl

[www.hoorexpert.nl](http://www.hoorexpert.nl)