

Handleiding Wek- en Waarschuwingssysteem (LISA Trilset)

Zenders

Deurbelzender/Telefoonzender

Bij zowel de deurbel, als de telefoon, is een zender geplaatst. Deze zender zendt een signaal door als de deurbel of telefoon overgaat. Hierdoor zullen de trilontvanger (pager) en de wekker afgaan.

In de zenders zit een 9V blokbatterij. Deze gaat gemiddeld 1 jaar mee. Mocht de batterij leeg zijn, kan deze gemakkelijk aan de achterzijde van de zender vervangen worden door het batterijklepje open te schuiven.



Rookmelder/Brandmelder/CO-melder

Zodra de melder geactiveerd wordt zullen de trilontvanger (pager) en de wekker afgaan.

Op de rookmelder bevindt zich een test-knop om de werking van de rookmelder te testen. Indien u deze 2 à 3 seconden ingedrukt houdt, zal de rookmelder een geluidsignaal geven. Daarnaast zullen de trilontvanger (pager) en de wekker afgaan. Test uw melder(s) iedere maand.




De melder(s) bevatten een accu die u niet zelf kunt vervangen. Wij zorgen ervoor dat uw melder(s) minimaal de - door uw zorgverzekering gestelde - gebruikstermijn goed werken maar u bent gebaat bij het goed onderhouden van uw melder(s). Haal daarom om de maand even een stoffer of stofzuigertje langs de melder(s) om het ingebouwde sensortje schoon te houden.

Ontvangers

Digitale wekker + trilschijf

Indien de telefoon, deurbel of rookmelder afgaat, zal ook de wekker een geluid afgeven en de trilschijf gaan trillen.

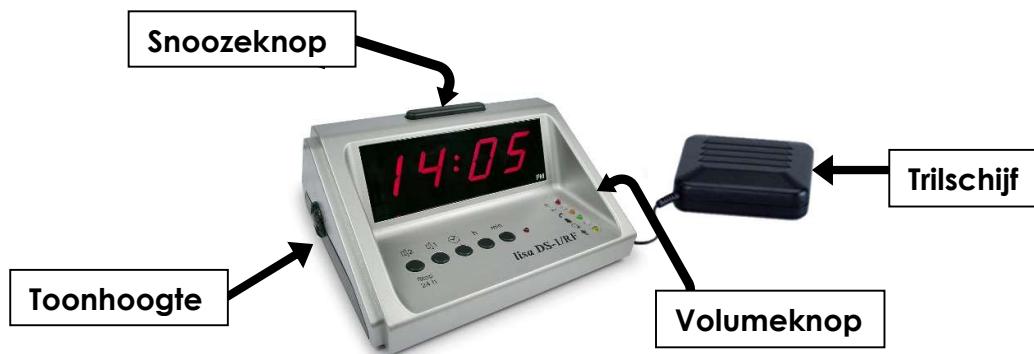

Wanneer er een signaal van deurbel, telefoon of rookmelder binnenkomt, zal de wekker 1 minuut geluid maken, flitsen en een eventueel aangesloten trilschijf laten trillen. U kunt ook zien aan de gekleurde lampjes om welke signaal het gaat. De alarmering kan vroegtijdig beëindigd worden door de snooze knop in te drukken.

Het volume kunt u aan de rechterzijde van de wekker afstellen. Indien gewenst kunt u met deze knop ook het volume volledig uitschakelen.

De toonhoogte kunt u aan de linkerkzijde van de wekker afstellen.

Om de tijd in te stellen houdt u de knop 'klok' en tegelijkertijd de knop 'h' (voor de uren) of 'min' (voor de minuten) ingedrukt. Laat los als de gewenste tijd is bereikt.

Met de knop '◀ 2' kunt u schakelen tussen een 24-uurs of 12-uurs display.

Om de wek-tijd in te stellen houdt u de knop '◀ 1' en tegelijkertijd de knop 'h' of 'min' ingedrukt. Laat los als de gewenste tijd is bereikt. Het is mogelijk een tweede wek-tijd in te stellen met de knop '◀ 2'. Dit doet u op dezelfde wijze als met de '◀ 1'.

Gebruik de knop '◀ 2' om het alarm uit te schakelen.

De wekkerfunctie wordt ingeschakeld door aan de achterzijde van de wekker de schuifknop 'on/off' op de stand 'on' te zetten. Vervolgens zal er een rood lampje aan de voorzijde van de wekker gaan branden.

De wekker beschikt over een snoozefunctie van 5 minuten. Deze wordt ingeschakeld als er op de zwarte snooze knop op de bovenzijde wordt gedrukt.

De in de wekker geplaatste 9V back-up batterij dient u eenmaal per jaar te vervangen. Hierdoor bent u er zeker van dat de wekker ook bij stroomuitval zal blijven functioneren.

De trilschijf bevat 3x AA batterijen die zo nodig vervangen moeten worden.

Trilontvanger (pager)

Wanneer er een signaal van deurbel, telefoon of rook/brandmelder binnenkomt, zal de trilontvanger 1 minuut lang gaan trillen. U kunt zien aan de gekleurde lampjes om welke signaal het gaat.

Bijvoorbeeld:

Trillen + **oranje** indicatielampje: melding telefoon

Trillen + **groen** indicatielampje: melding deurbel

Trillen + alle indicatielampjes: melding rook/brandmelder



Afbeelding
zonder
laadstation

Indien het (oranje) indicatielampje helemaal rechts op de trilontvanger (zonder symbool) gaat branden is de accu leeg en dient de trilontvanger opgeladen te worden.

Tijdens het opladen van de trilontvanger moet de trilontvanger uitgeschakeld zijn door de schuifknop 'on/off' op 'off' te zetten. Er zal een rood/blauw lampje op de lader gaan branden. Als de trilontvanger opgeladen is zal het lampje groen/blauw kleuren.

De accu's (750mAh, 1.2V) in de trilontvanger mogen niet worden vervangen door batterijen.

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar op onze website www.hoorexpert.nl

Bij storingen of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.